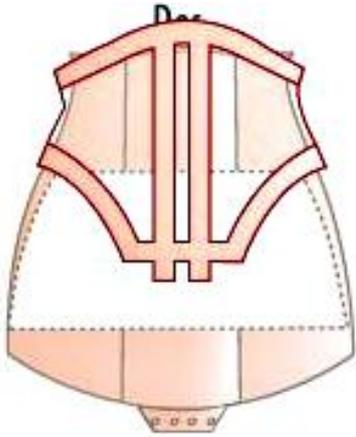
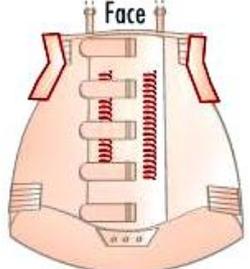


# CIVC 1 : corset d'immobilisation vertébrale **sur mesure**

Le corset textile (par rapport à la solution thermoformée) offre un confort accru grâce à la souplesse des matériaux utilisés tout en garantissant l'immobilisation prescrite.

**Prescription :** pathologie grave du rachis lombaire, immobilisation dorso-lombaire.

<p><b>CIVC 1</b></p> <p><u>Remboursement</u> : <b>oui</b></p> <p><u>Essayage</u> : <b>oui</b></p> <p><u>Renouvelable</u> : <b>chaque année</b></p> <p><u>Adjonctions possibles</u> : <b>oui</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ assurer la fixité</li> <li>□ améliorer l'application et le maintien</li> <li>◆ pathologie spécifique</li> </ul>		<p><b>Application :</b></p> <p>prescrit dans le cas de lésion rachidienne pathologique grave entraînant des répercussions algofonctionnelles importantes, le corset limite les mouvements antéropostérieurs du rachis et les flexions latérales.</p> <p>Hauteur d'application supérieure à D6.</p>
		

fermeture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 fermeture réglable «milieu devant» : bouclage par brides (bouclage à droite ou à gauche) ; ou «antérolatérale» par laçage (droit ou gauche)</li> </ul> <p><b>préciser</b> la position sur la fiche de mesure</p>
fermeture supplémentaire	agrafage ou microgrip avec «laçage» <b>préciser</b> la position sur la fiche de mesure
maintien	<p>forme «cage fermée »:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 aciers ressorts « devant » (largeur 13mm/épaisseur 3,5)</li> <li>- 2 aciers ressorts « dos » (largeur 20mm/épaisseur 12)</li> <li>- 1 fourche « scapulaire» (largeur 20mm/épaisseur 12)</li> <li>- 2 fourches «latérales » (largeur 20mm/épaisseur 12)</li> <li>- 1 acier ressort «lombaire» (largeur 20mm/épaisseur 12)</li> </ul>
choix matière et coloris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coutil Coton</li> <li>• 2 goussets «côtés» élastiques</li> </ul>
renfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plastron abdominal doublé coton</li> <li>• doublage dos et côtés avec confort mousse</li> <li>• protection coton sergé sur ressorts</li> </ul>
options	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plastron élastique</li> <li>• doublage «plastron devant» confort : mousse ou suédine</li> <li>• doublage «dos» : coton ou suédine (en plus de la mousse)</li> </ul>

<b>Adjonctions</b>	<b>informations à apporter sur la fiche de mesure</b>
■ Jarretelles	<b>préciser</b> le système de fixation (fixe ou boutonnée) <b>préciser</b> le nombre de paires
■ Pattes d'entrejambe amovible (1 paire)	<b>préciser</b> le système de fixation : «boutonnée» ou «microgrip»
■ Sous cuisses élastiques (1 paire)	<b>préciser</b> la longueur
□ Coussin post-opératoire de protection	<b>préciser</b> les dimensions « largeur » et « longueur » en cm
□ Patte hypogastrique réglable	<b>préciser</b> le système de fixation : bouclage bride « rivets pressions » - bouclage bride « velcro » - piton+ œillets - boucle 35mm <b>préciser</b> si 1 ou 2 tirants élastiques
□ Tirant hypogastrique réglable	<b>préciser</b> le système de fixation : bouclage bride « rivets pressions » - bouclage bride «velcro» - boucle 35mm
□ bride de rappel réglable lombosacrée	<b>préciser</b> le système de fixation: bouclage bride « rivets pressions » - bouclage bride «velcro» - boucle 35mm
□ Sangle intérieure	<b>préciser</b> le système de fixation : laçage ou agrafage <b>préciser</b> le côté de réglage : droit ou gauche <b>préciser</b> la hauteur
□ Bretelle (anté flexion du tronc) <small>si prolongement au niveau de la zone scapulaire</small>	<b>préciser</b> la hauteur
□ Épauière (anté flexion du tronc) <small>si nécessité de correction au niveau de la ceinture scapulaire</small>	<b>préciser</b> la longueur de la sangle dorsale en cm <b>préciser</b> le côté à maintenir : droit ou gauche
□ Béquillon réglable (sous axillaire)	<b>préciser</b> la hauteur du tuteur latéral en cm et le «côté» d'application
◆ Dispositif pour stomie	<b>préciser</b> l'emplacement lors de l'essayage (sans découper le produit ; indiquer le diamètre du cercle à réaliser)
◆ Pelote pour éventration ou hernie	<b>préciser</b> les dimensions « largeur » et « longueur » en cm
<b>Forme</b>	<b>informations à apporter sur la fiche de mesure</b>
□ Pelvienne ou Combiné droit (fermeture « milieu devant » : agrafage ou microgrip ; ou glissière 3/4)	<b>préciser</b> la forme choisie