

CMLR : ceinture de maintien lombaire renforcé **sur mesure**

Prescription : pathologie modérée du rachis lombaire, lombalgie ou lombo-sciatalgies (douleurs d'intensité importante aiguës ou chroniques).

<p>CMLR</p> <p><u>Remboursement</u> : oui</p> <p><u>Essayage</u> : oui</p> <p><u>Renouvelable</u> : chaque année</p> <p><u>Adjonctions possibles</u> : oui</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ assurer la fixité □ améliorer l'application et le maintien ◆ pathologie spécifique <p>ressorts "devant"</p> 	<p>Application :</p> <p>prescrite dans le cas de lésion rachidienne pathologique entraînant des répercussions algofonctionnelles importantes, la ceinture de maintien lombaire renforcée permet de limiter les mouvements antéropostérieurs du rachis. La ceinture participe à la prévention d'activités à risque (travail de force, voyage...).</p> <p>hauteurs d'application :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D 9 - D 12 
--	--

fermeture	<ul style="list-style-type: none"> • 1 fermeture réglable «milieu devant» ou «côté» <p>préciser la position sur la fiche de mesure</p>
fermeture supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> • 1 fermeture supplémentaire si nécessaire <p>préciser la position sur la fiche de mesure</p>
maintien	<p>formes «droite», «pelvienne», « gainante (culotte) » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 aciers ressorts « devant » (largeur 12mm/épaisseur 4-5) - 2 aciers ressorts «dos» (largeur 14mm/épaisseur 8) - 1 échelle ressort « dos » (largeur 2x14mm/épaisseur 8) - 2 ressorts «côté dos» + 2 ressorts «côtés» (12mm/ep4-5) - 1 baleine « fermeture réglable » (sauf agrafage) <p>fermeture « milieu devant» et « combiné » (droit ou culotte) » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 aciers ressorts « devant » (largeur 12mm/épaisseur 4-5) - 2 aciers ressorts «dos» (largeur 14mm/épaisseur 8) - 1 échelle ressort « dos » (largeur 2x14mm/épaisseur 8) - 2 ressorts «côté» (12mm/ep4-5) (sauf combiné)
choix matière et coloris	<ul style="list-style-type: none"> • « plastron devant » et « dos » en Coutil Coton • « côtés » élastiques
renfort	<ul style="list-style-type: none"> • plastron abdominal doublé coton • doublage dos avec confort mousse • protection coton sergé sur ressorts et baleines de maintien • protection suédine sous laçage côté
options	<ul style="list-style-type: none"> • morceaux élastiques supplémentaires <p>préciser la position sur la fiche de mesure</p> <ul style="list-style-type: none"> • doublage «plastron devant» confort : mousse ou suédine • doublage «dos» : coton ou suédine (en plus de la mousse)

Adjonctions	informations à apporter sur la fiche de mesure
■ Jarretelles	préciser le système de fixation (fixe ou boutonnée) préciser le nombre de paires
■ Pattes d'entrejambe amovible (1 paire)	préciser le système de fixation : «boutonnée» ou «microgrip» fixe pour forme culotte «gainante» et «combiné »
■ Sous cuisses élastiques (1 paire)	préciser la longueur
□ Coussin post-opératoire de protection	préciser les dimensions « largeur » et « longueur » en cm
□ Patte hypogastrique réglable	préciser le système de fixation: bouclage bride « rivets pressions » - bouclage bride « velcro » - piton+ œillets - boucle 35mm préciser si 1 ou 2 tirants élastiques
□ Tirant hypogastrique réglable	préciser le système de fixation: bouclage bride « rivets pressions » - bouclage bride «velcro» - boucle 35mm
□ bride de rappel réglable lombosacrée	préciser le système de fixation: bouclage bride « rivets pressions » - bouclage bride «velcro» - boucle 35mm
□ Sangle intérieure	préciser le système de fixation : laçage ou agrafage préciser le côté de réglage : droit ou gauche préciser la hauteur
□ Bretelle (anté flexion du tronc) si prolongement au niveau de la zone scapulaire	préciser la hauteur
□ Épaulière (anté flexion du tronc) si nécessité de correction au niveau de la ceinture scapulaire	préciser la longueur de la sangle dorsale en cm préciser le côté à maintenir : droit ou gauche
◆ Dispositif pour stomie	préciser l'emplacement lors de l'essayage (sans découper le produit ; indiquer le diamètre du cercle à réaliser)
◆ Pelote pour éviction ou hernie	préciser les dimensions « largeur » et « longueur » en cm